



Trois étapes en une pour une hygiène totale

dialox™ HP

Triple efficacité

Triple efficacité à température modérée :

- Nettoyage
- Détartrage
- Désinfection en conditions de saleté

Sécurité d'utilisation

- Biocompatible et non sensibilisant
- Prêt à l'emploi
- Rapidité d'action
- Dosage possible par conductivité
- Elimination totale par rinçage à l'eau

Respect des équipements

- Compatible avec les générateurs de dialyse
- Compatible avec les équipements de traitement d'eau
- Préviens la formation des biofilms sur les surfaces des circuits hydrauliques

Dispositif Médical classe IIA. Désinfectant breveté pour la désinfection des équipements de dialyse

[CE 0297]

Respect de l'environnement

- Biodégradable après usage

Gestion des produits chimiques

- Simplification et sécurisation grâce au produit unique

Indication

Désinfectant pour une hygiène totale des circuits internes des générateurs et du traitement d'eau en centre de dialyse. Dialox™ HP s'utilise donc seul et régulièrement sur ces équipements.

Attestation CE pour :

- Désinfectant en hémodialyse

L'efficacité du rinçage après désinfection doit être obligatoirement vérifiée. Ce contrôle s'effectue simplement à l'aide de bandelettes réactives, selon les indications figurant sur leur emballage.

Précautions d'emploi

Dialox™ HP est un produit d'usage externe. Consulter sa Fiche de Données de Sécurité (FDS) avant toute utilisation.

Compte tenu de son caractère irritant, porter obligatoirement des lunettes et des gants de protection lors de toute manipulation.

Mise en garde

La formule de Dialox™ HP a été spécialement adaptée à la désinfection des équipements en centre de dialyse et ne peut convenir à tout autre usage.

Interactions

Compte tenu des interférences possibles (antagonismes, inactivations, réactions dangereuses), le mélange ou l'emploi simultané de Dialox™ HP avec tout autre désinfectant ou produit chimique doit être absolument évité.

Présentations

Carton de 12 bidons en PEhd de 200 ml (réf. 104 145)

Carton de 4 bidons en PEhd de 5 l (réf. 104 142)

Bidon en PEhd de 10 l (réf. 104 143)

Bidon en PEhd de 20 l (réf. 104 146)

Bidon en PEhd de 25 l (réf. 104 144)

Accessoires

Clé d'ouverture et bouchon spécifique de protection à l'utilisation.

Composition

Acide peracétique-Peroxyde d'hydrogène-Acide acétique-Acide minéral fort-Synergisant

Agents tensio-actifs et Eau bi-osmosée qsp.

Caractéristiques physiques

- liquide incolore, légèrement moussant
- faible odeur acétique caractéristique
- stabilité : 15 mois conservé entre 5 et 30 °C à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine en position normale (évent au dessus).
- densité : 1.04
- point de congélation : - 10 °C
- pH à 20 °C : 0,75

Innocuité

- Dialox™ HP n'est pas classé dans la catégorie des préparations dangereuses par ingestion (test OCDE 401)
- Dialox™ HP n'est pas sensibilisant pour le cobaye (test OCDE 406)
- Dialox™ HP est irritant modéré pour la peau (test OCDE 404)
- Dialox™ HP est classé parmi les préparations irritantes pour les yeux (test OCDE 405)
- Dialox™ HP est irritant pour les voies respiratoires

Documentation disponible

Se référer au **Guide de l'utilisateur** pour toute question relative à son utilisation.

Consulter la FDS (Fiche de Données de Sécurité) avant toute utilisation.

Dossier technique sur demande.